

Dekontaminace sanitního vozu

MÍSTO

Zdravotnická záchraná služba
Středočeského kraje, p.o.

ROZSAH

dvě srovnávací opakování


POUŽITÉ VYBAVENÍ

1 generátor par peroxidu vodíku
10 bioindikátorů: *Geobacillus stearothermophilus*

Dekontaminační proces

PŘÍPRAVA NA DEKONTAMINACI

Provedení běžné očisty
Instalace zařízení
Umístění bioindikátorů

 Doba tvání: 30 min

PRŮBĚH DEKONTAMINACE

I. FÁZE - PŮSOBNÍ

Maximální koncentrace: 600 ppm

 Doba trvání: 30 min

II. FÁZE - ODVĚTRÁNÍ

Odvětrání par peroxidu vodíku
Koncentrace: < 1 ppm

 Doba trvání: 20 min

Výsledek

Žádný bioindikátor neprokázal přítomnost
životaschopných spór → Bylo dosaženo
sterilního prostředí



Reference

Ing. Jakub Vachek, vedoucí Pracoviště krizové připravenosti ZZS Středočeského kraje